

SONICLEAR - SAÚDE E BEM ESTAR

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

Fone: 11 2060-9500 / 11 2060-9510

Comercial / Administrativo:

Fone: 11 2591-6000 - Fax: 11 2274-6456

soniclear@soniclear.com.br

www.soniclear.com.br

Nome técnico: Adaptador Soniclear para uso de soro monodose.

Nome e modelo comercial: Adaptador nasal de soro.

PRODUZIDO EM SILICONE ATÓXICO

Responsável técnico: Ednilson André da Silva

CREA-SP nº5061754762-SP

Produto não perecível.

Validade: Indeterminada.

Fabricado por: Soniclear Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ: 58.511.270/0001-47.

Sede: Rua Basílio da Cunha, 882

Bairro Cambuci - CEP: 01544-001 - São Paulo - SP.

Garantia: 03 meses (Para defeitos de fabricação)

CÓDIGO: 4523.000

ADAPTADOR NASAL DE SORO




LEIA O GUIA
RÁPIDO DE USO


GUIA RÁPIDO DE USO




INSTRUÇÕES DE USO (PASSO-A-PASSO)

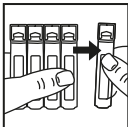

1- Destaque apenas o soro monodose que será utilizado. Os demais podem ser guardados, não é necessário armazenar em geladeira. Comece a destacar o soro monodose de cima para baixo, gire-o para trás, em direção contrária a você.

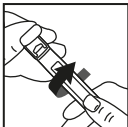

2- Segure firmemente o soro monodose na parte superior e gire a parte inferior para abri-lo.

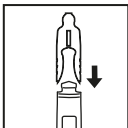

3- Encaixe o Adaptador no soro monodose, sempre com ele para cima e faça sua aplicação.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E ASSEPSIA

Antes e após o uso, lavar o Adaptador nasal de soro com água corrente. Após a lavagem, deverá ser feita a assepsia mergulhando em água fervente por um período de 3 minutos.

Após este procedimento retire o excesso de água e deixe secar naturalmente, não utilize álcool ou abrasivos para limpeza bem como pano, toalha de papel ou qualquer outro tipo de tecido para secar.

CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE O USO

Restrições:

Não se automedique e respeite a prescrição do seu médico.

*Consulte seu médico para o uso em crianças menores de 2 anos.

Advertências:

O Adaptador nasal de soro não deve ser utilizado por crianças para qualquer tipo de brincadeiras, mesmo quando o produto estiver fora de uso.

Não deixar o Adaptador ao alcance de crianças. Deve ser usado sempre com a supervisão de um adulto.